

## **Инструкция по применению полумаски фильтрующей с клапаном 060620**

- 1. С чистыми руками достаньте полумаску из упаковки.**
- 2. Наденьте полумаску, придерживая одной рукой.**
- 3. Заведите ленты крепления за голову. Зафиксируйте на уровне теменной и затылочной части головы.**
- 4. Подтяните и зафиксируйте ленты при необходимости. Полумаска должна надежно держаться на лице, не создавая сильного давления на кожные покровы.**
- 5. Удерживая полумаску на лице, сделайте резки вдох/выдох. Убедитесь, что подсос воздуха по линии прилегания отсутствует.**