

## Аспиратор назальный Отривин Бэби


Изделие медицинского назначения, рег. удостоверение № ФСЗ 2008/01133 от 14.08.2018

Аспиратор назальный Отривин Бэби предназначен для детей (новорожденных, грудных, младшего детского возраста). Аспиратор очищает нос Вашего ребенка, мягко удаляя беспокоящие его слизистые выделения.

Аспиратор прост и гигиеничен в применении. С его помощью малыш вновь обретет свободное дыхание и почувствует себя комфортно.

Для облегчения процедуры перед использованием назального аспиратора Отривин Бэби рекомендуется промыть нос солевым раствором, например, каплями или спреем Отривин Бэби.

### Способ применения

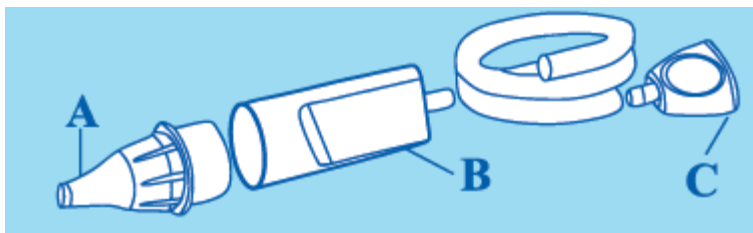

1. Присоедините сменную насадку (А) к центральной части корпуса (В) аспиратора.
2. Возьмите мундштук (С) в рот (для родителей и лиц, ухаживающих за ребенком) и вставьте наконечник (А) в один из носовых ходов ребенка.
3. Осторожно вытягивайте воздух ртом при помощи равномерных вдохов через мундштук (С).
4. Если насадка заполняется выделениями в промежутке между вдохами, удалите секрет из насадки в салфетку, продувая мундштук, или замените насадку.
5. Повторите процедуру для другого носового хода.
6. Отсоедините и выбросьте использованную насадку (А).

В целях соблюдения гигиены и для исключения повторного инфицирования насадки следует использовать лишь однократно. Одноразовые сменные насадки для аспиратора Отривин Бэби продаются отдельно.

Аспиратор назальный Отривин Бэби с тремя сменными насадками предназначен для устранения выделений из носа, беспокоящих Вашего малыша при насморке. Удаление слизистых выделений из носа способствует предотвращению осложнений, например, отита, синусита и кашля.

К аспиратору прилагаются 3 одноразовые сменные насадки. Ограничения по применению - перед использованием следует внимательно ознакомиться с информацией на упаковке.

Не следует использовать аспиратор при наличии аллергии на материалы, из которых изготовлены компоненты изделия.

### Состав:

аспиратор - силиконовая трубка, полиэтилен низкой плотности, полипропилен; насадки - полипропилен, меламиновая пена.

Не следует использовать аспиратор, если он испорчен или поврежден.

Хранить в недоступном для детей месте в оригинальной упаковке. Хранить изделие при температуре не ниже 0 °С и не выше 30 °С.

Срок годности 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Хранить в оригинальной упаковке.

**Организация, принимающая претензии на территории Российской Федерации:**

АО "ГлаксоСмитКляйн Хелскер", Россия, 123112, Москва, Пресненская набережная, д. 10

Тел. 8 (495) 777-98-50

факс 8 (495) 777-98-51

Телефон бесплатной "Горячей линии"

8 800 333 46 94

E-mail: [rus.info@gsk.com](mailto:rus.info@gsk.com)