

ПАМЯТКА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И УХОДУ ЗА ПОДУШКОЙ ИЗ ВЯЗКОЭЛАСТИЧНОГО ПОЛИУРЕТАНА



ПОДУШКА ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ

ТУ 13.92.24-003-53828880-2019

Товар является медицинским изделием.

ПУ №РЗН 2021/13491 от 15 февраля 2021 года срок действия: не ограничен.

Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации или проконсультируйтесь со специалистом.

Показания к применению:

- повышенный тонус мышц шеи, нарушение мышечного баланса;
- нарушения сна.

Подготовка к использованию:

- Снять с подушки упаковку.
- Визуально проверить подушку на наличие производственного дефекта.
- Проветрить подушку в течение 3-5 дней.

Эксплуатационные ограничения:

- Подушку нельзя подвергать резким механическим воздействиям: скручивать и сгибать подушку, прыгать и ходить по ней.
- Не подвергать нагрузке более 25 кг.
- Беречь от соприкосновения с острыми и режущими предметами.
- Беречь от соприкосновения с нагревательными элементами и открытым огнем.
- Не проливайте на подушку красящие вещества, напитки и лекарства.
- При наличии загрязнений на изделии протрите его мягкой тканью с раствором детского мыла, смойте водой и просушите вдали от отопительных приборов в хорошо проветриваемом помещении.

Внимание!!!

- Основание подушки не подлежит ручной или машинной стирке.
- Подушка имеет лицевую и изнаночную/нижнюю стороны. Нижняя сторона может иметь неоднородную поверхность, которая не влияет на потребительские свойства товара (процент неоднородности не превышает 10% от общей площади поверхности).
- Основание подушки может изменить цвет от белого до желтого. Данная особенность возникает вследствие попадания ультрафиолетовых лучей на основу, и не влияет на потребительские свойства товара.
- Пришедшее в негодность изделие утилизируйте вместе с полимерными бытовыми отходами.