

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Перед применением проконсультируйтесь со специалистом. Для облегчения проведения процедуры рекомендуется увлажнить полость носика ребенка специальным солевым раствором. Далее возьмите мундштук в рот и вставьте наконечник аспиратора в один из носовых ходов ребенка. Осторожно втягивайте воздух ртом при помощи равномерных вдохов через мундштук. Контролируйте заполняемость контейнера аспиратора. При необходимости отделите наконечник от корпуса и промойте изделие от слизистого секрета. Далее можно продолжить процедуру для другого носового хода. Перед применением следует тщательно вымыть изделие с помощью мыльного раствора, окатить крутым кипятком и просушить. В лечебных учреждениях аспиратор дезинфицируют погружением в 3%-ный раствор перекиси водорода или в 3%-ный раствор хлорамина согласно МУ 287-113. По окончании дезинфекционной выдержки аспиратор промывают проточной питьевой водой.