

Артикул:

7350046330207

Наименование:

ТРУБКА ГАЗООТВОДНАЯ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ. Первая помощь при газиках у новорожденных и малышей.

Изготовитель:

DiProServa Medical AB, Adelgatan 21, 211 22 Malmö, Sweden. ДиПроСерва Медикал АБ, Адельгатан, 21, Мальмо, Швеция.

Поставщик в Республику Беларусь:

ООО «ПиЭн БелРус», Республика Беларусь, 220030, г. Минск, ул. Зыбицкая 2, пом. 5, офис 26.

Страна производства:

Швеция

Рекомендации по использованию:

1. Помассируйте животик малыша, нежно проводя рукой от правого бока к центру животика, а затем сверху вниз, чтобы направить газы к анальному отверстию (см. рис.1). Сделайте аналогичный массаж с левой стороны. Повторите массаж по 3 раза с каждой стороны. 2. Всегда смазывайте газоотводную трубку (ректальный катетер) детским кремом, маслом или вазелином перед введением, чтобы облегчить ввод. Поднимите ножки ребенка и аккуратно вставьте катетер WINDI в анальное отверстие ребенка аналогично термометру (см.рис.2). Когда газы начнут выходить наружу, Вы сразу услышите характерный звук. Иногда вместе с газами может выйти небольшое количество фекалий. Если газы не вышли сразу, повторите массаж и попробуйте ввести катетер снова. Иногда требуется повторить процедуру несколько раз, чтобы достичь желаемого результата. Во время проведения одной процедуры Вы можете использовать один и тот же катетер WINDI несколько раз. 3. Приучите себя выбрасывать катетер WINDI после того, как Вы закончили процедуру. Повторное использование катетера через какое-то время может быть небезопасным. Важно помнить: Никогда не оставляйте катетер в анальном отверстии ребенка после проведения процедуры. Не используйте WINDI более 3х раз в день, так как чрезмерно частое использование может снизить естественные рефлексy кишечника Вашего малыша. Для одноразового использования.

Комплектация:

10 шт.