

## Инструкция по применению Накладка силиконовая на грудь Формирователь сосков

### Формирователь сосков

Формирователи сосков от Medela отличаются удобством использования. Благодаря анатомической форме и гибкой силиконовой мембране, которая плотно прилегает к коже, формирователи сосков незаметны под одеждой и не доставляют дискомфорта. Сквозь вентиляционные отверстия в верхней части формирователя поступает воздух, а значит, кожа остается сухой и быстро заживает. Формирователи сосков помогают подготовить плоские или втянутые соски к грудному вскармливанию. Некоторым детям бывает трудно правильно захватить плоский или втянутый сосок, и в результате сосок оказывается травмирован. Силиконовая мембрана слегка сдавливает сосок, чтобы он выступал наружу. Подготовку сосков можно начинать еще в период беременности (примерно с 32 недели и далее). Для начала используйте формирователи сосков в течение одного часа ежедневно, постепенно доводя длительность ношения до 8 часов в день. После родов используйте формирователи между кормлениями, надевая их за 1,5-2 часа до кормления. Во избежание потертостей надевать формирователи по ночам не рекомендуется.

**Внимание!** Проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.

#### Сборка и использование

Наложите силиконовую мембрану на основу. Край мембраны должен плотно охватывать основу. Поместите собранный формирователь в бюстгальтер так, чтобы сосок располагался по центру отверстия. Вентиляционные отверстия должны находиться в верхней части формирователя. При использовании формирователей сосков рекомендуется носить бюстгальтер для кормления, поскольку он просторнее обычного белья и обеспечит более комфортное прилегание формирователей.

**Внимание!** Если в формирователях скопилось молоко, не давайте его ребенку. Это молоко следует вылить.

#### Уход за формирователями

Перед первым использованием и далее раз в день Разберите формирователи и поместите детали в небольшую емкость с холодной водой. Рекомендуется использование дистиллированной воды. Чтобы избежать возникновения известкового налета, при использовании водопроводной воды можно добавить чайную ложку лимонной кислоты. Доведите воду до кипения и кипятите примерно пять минут. Слейте воду и поместите детали на чистое полотенце, чтобы дать им высохнуть.

#### После каждого использования

Разберите формирователи. Промойте накладку и мембрану мягким моющим средством, тщательно ополосните холодной водой и высушите на чистом полотенце.

#### Примечание

Допускается использование посудомоечной машины или автоклава.

#### Материал

Накладка: полипропилен / Силиконовая мембрана: силикон

#### Утилизация

В соответствии с местным законодательством.

CE-маркировка: в соответствии с 93/42/ЕЕС)

