

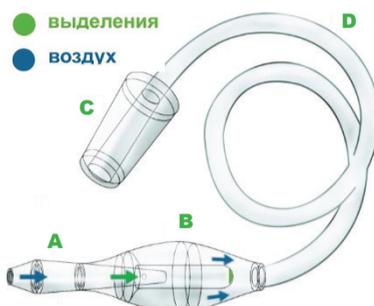
**Инструкция по применению:****Подготовка к использованию:**

- ▶ Установите регулятор мощности вашего пылесоса на минимум.  
**Внимание: Рекомендуемая потребляемая мощность пылесоса составляет 800-1800 Вт.**  
| В случае, если регулятор мощности у вашего пылесоса отсутствует, используйте приоткрывающееся окошко на трубке пылесоса для регулировки давления, что также не допустит перегрева вашего пылесоса.
- ▶ Включите пылесос в розетку.  
| Рекомендуется поместить пылесос на максимальном расстоянии от ребенка, но так чтобы была возможность включить и выключить пылесос.

- ⊘ Не используйте аспиратор для других целей, кроме описанных в инструкции.
- ⊘ Не используйте аспиратор в случае повреждения одной из деталей.
- ⊘ Не используйте аспиратор при наличии аллергии на материал, из которого изготовлены составные части прибора.

**Сборка и подключение:**

- 1 Перед первым использованием промойте аспиратор и насадку мыльным раствором;
- 2 Вставьте сменную многоразовую насадку (А) в колбу-коллектор (В);
- 3 Вставьте насадку (С) в трубку пылесоса;
- 4 Включите пылесос.

**Способ применения:**

- 1 Выберите удобную позу для проведения процедуры в зависимости от возраста ребенка:

При использовании аспиратора для новорождённых и грудных детей (0-18 месяцев), рекомендуется разместить ребенка в позу полуплежа или сидя, насколько это возможно. В подобном положении, процесс аспирации будет наиболее эффективен и прост.



Детей младшего и среднего возраста (старше 18-ти месяцев) рекомендуется усадить на колени, спиной к себе. Слегка наклонить голову вперед, чтобы облегчить удаление носовых выделений.



**Совет:** Для большей эффективности перед удалением слизи рекомендуется провести орошение носовой полости 0.9%-м солевым раствором, это позволит подготовить слизистую

- 2 Вставьте насадку в один из носовых ходов ребенка. Конструкция аспиратора не позволит вставить насадку глубоко, что дополнительно обеспечивает безопасность процедуры.

Для повышения эффективности рекомендуется слегка передвигать насадку из стороны в сторону, а также вверх-вниз, не вынимая при этом из ноздри.



**Совет:** При использовании аспиратора не рекомендуется задерживать дыхание, закрывать рот. В этом случае от перепада давления может заложить уши. Чаще всего дети придерживаются вышеперечисленных рекомендаций на подсознательном уровне.

- 3 Извлеченную слизь вы увидите в прозрачной конструкции прибора.



**Совет:** В случае большого скопления слизи рекомендуется держать насадку максимально перпендикулярно полу, так чтобы исключить попадание слизи в трубку аспиратора и далее в пылесос. В случае попадания слизи в пылесос, рекомендуется сменить или промыть пылесборник вашего пылесоса по завершению процедуры.

- 4 Повторите процедуру для другого носового хода.



**Совет:** Каждый сеанс должен длиться не более 5 секунд. В случае если этого недостаточно, рекомендуется провести повторные сеансы с перерывами в 3-5 секунд. Повторение целесообразно до тех пор, пока в колбе появляются новые порции выделений.

- 5 Выключите пылесос.

- 6 После процедуры разберите аспиратор:

Отсоедините насадку

Разберите колбу

Промойте прибор теплым мыльным раствором, дезинфекция не требуется. Не используйте абразивные чистящие средства, а также химические растворы, это может повредить аспиратор.

- 7 Просушите прибор.  
Бэйби-Вак снова готов к использованию.

- 8 Подробную видео инструкцию смотрите на сайте [www.аспиратор.рф](http://www.аспиратор.рф)



**Совет:** Как мотивировать малыша и научить не бояться чистить носик?

После процедуры обязательно похвалите малыша. Скачайте сертификат «Самого смелого пациента» на сайте [аспиратор.рф](http://аспиратор.рф), заполните и вручите вашему ребенку.

**Хранение:** Аспиратор необходимо хранить:

- ▶ В разборном виде в недоступном для детей месте.
- ▶ В помещении при температуре воздуха от +5° до +40°С и относительной влажности воздуха не более 80%.
- ▶ Срок годности: см.на упаковке.

**Материалы:**

Поликарбонат – насадка на трубку пылесоса, колба-коллектор, сменные многоразовые насадки.

**Производитель:**

Иллеш Чок эш Тарша Кфт., Венгрия  
1146 Будапешт, Аджтоси Дюрер сор. 35.

**ОТВЕТСТВЕННЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР (поставщик):**  
ООО «Бэйби-Трейд»

191119, Россия, г. Санкт-Петербург,  
ул. Боровая 32, лит. А, пом. 53Н

тел. (812) 600 4 604,  
факс (812) 600 4 664  
e-mail: [online@baby-trade.org](mailto:online@baby-trade.org)

[www.аспиратор.рф](http://www.аспиратор.рф)  
Пер. уд. № РЗН 2014/1635 от 22.10.2018