

5. СОВЕТЫ ПО СЦЕЖИВАНИЮ

- Лучшее время для сцеживания — утро, когда у мамы самый большой прилив молока. Удачное время для сцеживания также до первого кормления или сразу после, если у мамы осталось молоко.
- Для сцеживания лучше всего подходит спокойное место, где вы можете расслабиться. Если вы находитесь вдали от малыша (например, на работе), смотрите на его фотографию — рассматривание фото с ребёнком способствует приливу молока.
- Если вы находитесь дома, перед сцеживанием можно принять расслабляющую ванну или приложить к груди тёплое полотенце на несколько минут.
- При появлении болезненных ощущений во время сцеживания, прекратите пользоваться молокоотсосом и проконсультируйтесь со специалистом по грудному вскармливанию.

6. СМЕНА РЕЖИМОВ И УРОВНЕЙ СЦЕЖИВАНИЯ

1. После нажатия на кнопку питания блок управления автоматически переходит в режим мягкой стимуляции.
2. Нажмите кнопку переключения режима сцеживания, чтобы выбрать один из двух режимов: мягкое сцеживание или стимуляция.
3. Отрегулируйте интенсивность сцеживания с помощью кнопок управления электронного блока (с 1 по 9 уровень).

7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Перед тем, как начать сцеживание, тщательно вымойте руки и грудь. Примите удобное положение сидя и расслабьтесь. Под спину можете подложить подушку. Поставьте рядом с собой стакан воды.
2. Аккуратно поместите грудь в воронку соединителя, убедитесь, что сосок находится в центре воронки.
3. Красная подсветка кнопки питания означает, что аппарат работает в режиме стимуляции сцеживания. Синяя подсветка означает режим сцеживания. Нажимайте на стрелочки вверх или вниз, чтобы отрегулировать интенсивность режима симуляции или сцеживания.

ВНИМАНИЕ!

Необязательно выбирать максимальную интенсивность сцеживания — выберите максимально комфортный для вас режим.

4. После завершения сцеживания отключите блок управления и аккуратно достаньте грудь из воронки.
5. Чтобы убрать бутылочку на хранение, открутите её от соединителя. Чтобы очистить соединитель, воспользуйтесь инструкцией из раздела «Чистка и дезинфекция».
6. Отключите блок управления от сети.

8. ЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ КИПЯЧЕНИЕМ

Перед первым использованием простерилизуйте в кипящей воде все детали молокоотсоса, кроме блока управления и микро-USB-кабеля, в течение пяти минут. Во избежание повреждения клапана и ухудшения работы молокоотсоса снимайте клапан, аккуратно держа его двумя пальцами за узкую часть. Промывайте клапан тёплой водой, добавив пару капель чистящего средства. Не используйте посторонние предметы для очищения клапана изнутри.

9. ХРАНЕНИЕ И ПОДОГРЕВ МОЛОКА

Хранение сцеженного грудного молока

После сцеживания плотно закройте тару с молоком и сразу же поместите её в холодильник. В холодильнике грудное молоко можно хранить до 48 часов, в морозильной камере — до 3 месяцев.

Подогрев сцеженного грудного молока

Быстро и безопасно подогреть грудное молоко можно в подогревателе детского питания. Ещё один простой способ — поместить тару с молоком в тёплую воду.

ВНИМАНИЕ!

Не разогревайте бутылочки с грудным молоком в микроволновой печи — при таком способе разогрева в молоке разрушаются все полезные и питательные вещества.


ВНИМАНИЕ

1. Если вы хотите заморозить молоко, заполните тару на 3/4.
2. Никогда не храните молоко на дверце холодильника.
3. Чтобы при размораживании сохранить в грудном молоке полезные вещества, поместите тару с замороженным молоком на ночь в холодильник, затем согрейте молоко под струей тёплой воды.
4. Аккуратно встряхните бутылочку с молоком.
5. Чтобы сохранить полезные и питательные свойства молока, не разогревайте замороженное молоко в СВЧ-печи и не опускайте его в кипящую воду.
6. Не замораживайте сцеженное грудное молоко повторно.
7. Не добавляйте только что сцеженное молоко в размороженное.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Молокоотсос — предмет личной гигиены и не подлежит обмену. Аккуратно разбирайте и собирайте молокоотсос. Не оставляйте молокоотсос вблизи источников возгорания. Храните в недоступном для детей месте.

10. ОПТИМАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СЦЕЖИВАНИЯ

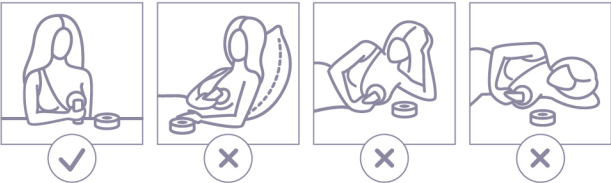

Нежная забота о маме и малыше

ГАРАНТИЯ

Срок службы: 2 года.
Гарантийный срок: 1 год.

Гарантия не распространяется в случае некорректного хранения, неправильного использования или износа.

Напряжение сети: 5 В.

Тип тока: постоянный.

Макс. сила тока через USB-интерфейс: 900 мА.

Произведено в Китае.

Изготовитель: Shantou Yisheng Trading Co, Ltd (Шантоу Ишэн Трейдинг Ко, Лтд).

Адрес: Laimel Industry Areas, Chenghai, Shantou, Guangdong, China (Лаймэй Индастри Эреас, Чэнхай, Шантоу, Гуандун, Китай).

Дата изготовления указана на упаковке.

Молокоотсос электрический

Baby Go

Артикул BG-1040
Модель S006AA



ИНСТРУКЦИЯ



EAC

1. ВВЕДЕНИЕ


Специалисты считают, что грудное молоко — лучшее питание для детей в первый год жизни. Грудное молоко необходимо ребёнку, оно помогает защитить его от инфекций и аллергии.

Молокоотсос Baby Go помогает маме наладить и сохранить грудное вскармливание. Воронки лепестками надёжно соприкасаются с грудью мамы и имитируют сосущие движения малыша, позволяя просто, нежно и быстро сцеживается. Молокоотсос легко собирается и не содержит бисфенол А. Все детали молокоотсоса, кроме блока управления, можно мыть в посудомоечной машине.

Двухфазная конструкция позволяет сцеживать в два раза больше молока, улучшая его выработку и облегчая болезненные ощущения в груди.

Схема блока управления

1. Кнопка включения / выключения питания
После нажатия на кнопку питания блок управления автоматически переходит в режим мягкой стимуляции
2. Кнопка переключения режима сцеживания
2 режима (мягкая стимуляция и сцеживание)
3. Кнопка уменьшения уровня интенсивности стимуляции / сцеживания
4. Кнопка увеличения уровня интенсивности стимуляции / сцеживания

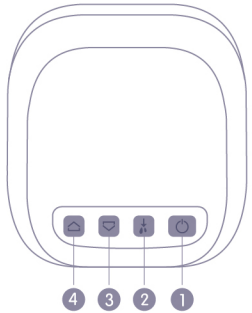


ВНИМАНИЕ!

Используйте источник тока 5 В 1 А

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ МОЛОКООТСОСА BABY GO

1. Соединители (воронки), 24 мм — 2 шт.
2. Силиконовые диафрагмы — 2 шт.
3. Защитные крышки с коннектором — 2 шт.
4. Соединительные трубки — 3 шт.
5. Клапаны насоса с силиконовой мембраной — 2 шт.
6. Бутылочки для кормления — 2 шт.
7. Соска с колпачком
8. Блок управления
9. Микро-USB кабель
10. Коннектор
11. Нетканый мешочек

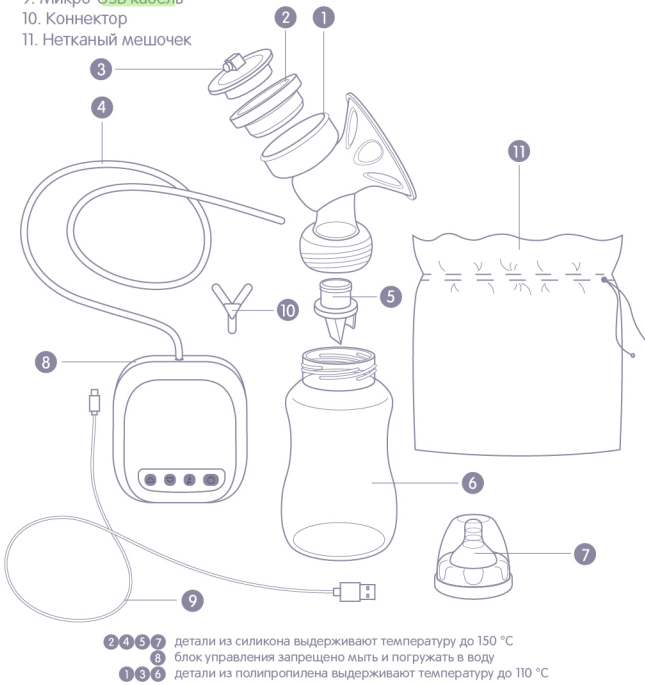

2 4 5 7 детали из силикона выдерживают температуру до 150 °С
8 блок управления запрещено мыть и погружать в воду
1 3 6 детали из полипропилена выдерживают температуру до 110 °С

3. ПОДГОТОВКА И СБОРКА МОЛОКООТСОСА



Примечание: Тщательно мойте руки до и после сцеживания.


Во избежание ожогов не касайтесь молокоотсоса незащищенными руками после дезинфекции в кипящей воде.



Совет: собрать молокоотсос будет легче, если намочить детали.



Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию. Сохраняйте инструкцию на все время эксплуатации устройства.

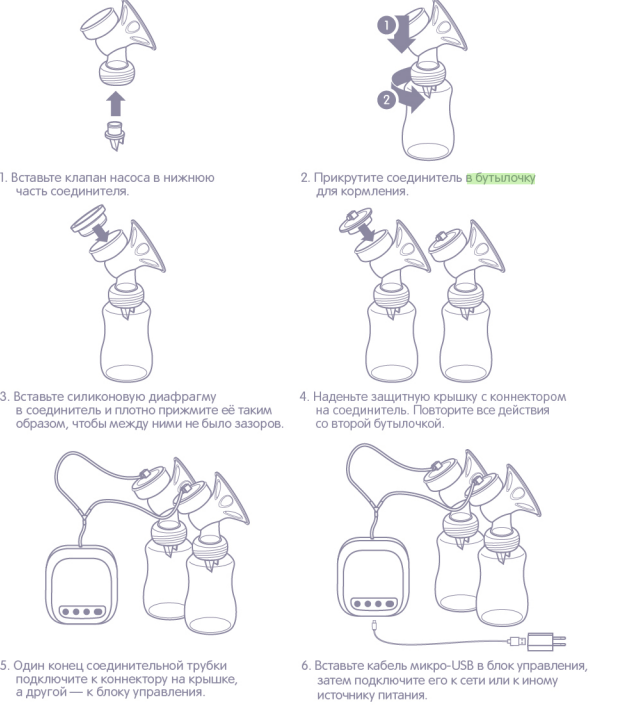

4. РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ

Молокоотсос не создаёт достаточный вакуум

Убедитесь, что молокоотсос собран правильно. Проверьте, не повреждён ли клапан насоса (примечание: чистите клапан очень осторожно). Удостоверьтесь, что силиконовая диафрагма плотно прилегает к соединителю.

Трудности при сцеживании

Убедитесь, что молокоотсос собран правильно. Выберите комфортную позу, расслабьтесь. Убедитесь, что молочные протоки не закупорены, аккуратно выдавив из соски несколько капель молока. Посмотрите советы при сцеживании в пункте 6.

Болезненные ощущения во время сцеживания

Уменьшите интенсивность сцеживания. Если ощущения не исчезнут, временно откажитесь от использования молокоотсоса. Посоветуйтесь с врачом или обратитесь к специалисту по грудному вскармливанию.

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЛОКООТСОСА

Когда сцеживать молоко

Сцеживание рекомендовано начинать после того, как выработка молока и лактация стабилизируются. Обычно это происходит спустя 2–4 недели после родов. По рекомендации врача или специалиста по грудному вскармливанию сцеживание можно начать раньше.

И в следующих исключительных случаях:

- Грудное вскармливание ещё не налажено — регулярное сцеживание поможет стимулировать и поддерживать приток молока.
- При сильных приливах молока (присутствуют боль и отёк) — можно сцеживать небольшое количество молока перед или между кормлениями, чтобы облегчить боль и помочь малышу быстрее взять грудь.
- При воспалении сосков и появлениях на них трещин — кормите малыша сцеженным молоком, пока соски не заживут.
- Для стимуляции притока молока, если после родов вы с ребёнком находитесь в разных палатах, но планируете кормить грудью в дальнейшем.