

Артикул:

O4-0040

Наименование:

Ручной молокоотсос с принадлежностями (набор для сцеживания и кормления в комплекте с ручным молокоотсосом, запасными накладками (3шт.), базой-подставкой, контейнером-бутылочкой объемом 150 мл, силиконовой соской, заглушкой и колпачком для контейнера-бутылочки), с товарным знаком «Baby Go» (Беби Гоу)

Изготовитель:

Ningbo Raffini Import And Export Co, Ltd (Нинбо Раффини Импорт Энд Экспорт Ко, Лтд). Адрес: No.198 Changshou Road, Yinzhou, Ningbo, China (№ 198 Чаншоу Роуд, Иньчжоу, Нинбо, Китай).
Фабрика-филиал изготовителя: Ningbo Longwell Baby And Beauty Products Co, Ltd (Нинбо Лонгвелл Беби энд Бьюти Продактс Ко, Лтд). Адрес: 77, 520 Lane, Tongning Road, Jiangbei District, Ningbo, 315033, China (77, 520 Лейн, Туннин Роуд, Цзянбэй Дистрикт, Нинбо, 315033, Китай).

Поставщик в Республику Беларусь:

ООО «Детмир БЕЛ»; УНП 193143448. Юр. адрес: Республ

Страна производства:

Китай

Гарантийный срок:

Гарантийный срок эксплуатации контейнера-бутылочки: 12 месяцев со дня реализации.
Гарантийный срок эксплуатации соски: один месяц со дня продажи, а для лечебных учреждений — 20 суток со дня получения потребителем.

Рекомендации по использованию:

Молокоотсос эффективен только при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации, изложенных в инструкции (инструкция по использованию прилагается), и тщательного ухода. Для обеспечения максимального срока службы и соблюдения требований по гигиеничности следует разбирать и мыть после каждого применения. Проверяйте контейнер-бутылочку и соску для кормления перед каждым использованием; незамедлительно исключайте из употребления поврежденные изделия. Не оставляйте ребенка без присмотра взрослых во время кормления. Температура питья не должна быть выше 40 °С. Не разогревайте контейнер-бутылочку с навинченной крышкой. Не рекомендуется использовать контейнер-бутылочку для газированных напитков. Уход: перед первым применением все детали молокоотсоса, контейнер-бутылочку и соску для кормления можно стерилизовать в открытой посуде не более 5 минут. Молокоотсос рекомендуется мыть перед и после каждого использования в горячей воде (не выше 75 °С) с моющим средством, предварительно разобрав его на части согласно инструкции (инструкция по использованию прилагается). После мытья необходимо тщательно ополоснуть и просушить все детали молокоотсоса при комнатной температуре. Сборка молокоотсоса производится только после того, когда все комплектующие детали высохнут. Хранить в сухом месте, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Контейнер-бутылочку рекомендуется мыть ершиком в горячей воде (не выше 75 °С) с моющим средством. После мытья контейнер-бутылочку необходимо тщательно ополаскивать и сушить при комнатной температуре. Рекомендуется хранить в сухом месте, не допуская попадания прямых солнечных лучей, масел, растворителей и кислот. Соску рекомендуется мыть в горячей воде с моющим средством или стерилизовать в кипящей воде не более 5 минут. После мытья соску необходимо тщательно ополаскивать и сушить при комнатной температуре. После каждого использования тщательно промыть соску теплой водой и высушить при комнатной температуре. Хранить соску рекомендуется в сухом состоянии, в закрытой посуде при температуре от 0 до 25 °С, не допуская попадания прямых солнечных лучей, масел,

растворителей и кислот. При появлении трещин на поверхности соски ее необходимо выбросить.

Комплектация:

набор для сцеживания и кормления в комплекте с ручным молокоотсосом, запасными накладками (3шт.), базой-подставкой, контейнером-бутылочкой объемом 150 мл, силиконовой соской, заглушкой и колпачком для контейнера-бутылочки