

Инструкция по применению Воронка PersonalFit™ для медицинских учреждений

Инструкция по применению Воронка PersonalFit™

Назначение

Воронки PersonalFit компании Medela предназначены для различных размеров сосков. Они обеспечивают оптимальное выделение молока из груди в контейнер для сбора молока при использовании молокоотсоса Medela.

Воронки PersonalFit выпускаются в нескольких размерах: S (21 мм), M (24 мм), L (27 мм), XL (30 мм) и XXL (36 мм). Они совместимы с многоразовыми наборами для сцеживания Medela для Symphony и Lactina, со стандартным набором, а также с молокоотсосами Medela для персонального использования.

Правила безопасности

- I Использование несколькими мамами без надлежащей стерилизации может создать опасность для здоровья.
- I Используйте только оригинальные принадлежности Medela.
- I Перед каждым применением тщательно осмотрите изделие. При первых признаках повреждения или износа изделие следует утилизировать.
- I В случае возникновения проблем или болевого синдрома проконсультируйтесь у лечащего врача или специалиста по грудному вскармливанию.

Обработка

Важно!

- I Промойте воронку сразу же после использования во избежание засыхания остатков молока и предотвращения роста бактерий.
- I Для очистки следует использовать исключительно питьевую воду.
- I При использовании чистящей щетки соблюдайте осторожность, чтобы не повредить детали.

Перед первым использованием и раз в день

- I Промойте воронку в моюще-дезинфицирующей машине при температуре 93 °C в течение пяти минут.
- I Стерилизуйте воронку в автоклаве при температуре 134 °C в течение трех минут.

После каждого использования

- I Прополощите воронку холодной чистой водой (прим. 20 °C).
- I Промойте большим количеством теплой воды и средством для мытья посуды (при температуре около 30 °C).
- I Прополощите холодной чистой водой (прим. 20 °C).
- I Протрите чистым полотенцем либо поместите на чистое полотенце для высыхания.
- I Храните изделие в чистом пакете или завернутым в чистую бумагу/ткань до следующего использования.

Гигиена

Перед каждым применением

- I Тщательно вымойте руки с мылом и питьевой водой перед соприкосновением с грудью.
- I Протрите грудь и ареолу влажной тканью. Избегайте использования мыла или содержащих алкоголь средств. Это может привести к высушиванию кожи и появлению трещин на сосках.

Сборка и использование

- I Прикрепите воронку к коннектору выбранного набора для сцеживания Medela. Убедитесь, что воронка и коннектор плотно соединены.
- I Информация об использовании воронки и молокоотсоса изложена в инструкции по применению воронки / набора для сцеживания.

Выбор правильного размера воронки

На протяжении всего периода кормления грудью размер груди мамы изменяется. Необходимо всегда выбирать воронку подходящего размера. Правильно выбранная воронка предотвращает пережатие молочных протоков во время сцеживания, обеспечивает оптимальное опорожнение груди и помогает добиться максимальной эффективности сцеживания.

Правильно подобранная воронка плотно охватывает сосок, сохраняя при этом достаточно места, чтобы обеспечить свободное движение вперед и назад. См. первый рисунок ниже.



Воронка подобрана оптимальным образом и обеспечивает максимальный комфорт.

Воронки, приведенные на рисунках ниже, подобраны **неправильно**.



Воронка слишком мала.



Воронка слишком велика.

Дополнительную информацию можно найти на веб-сайте www.medela.com/personalfit

Список деталей

200.0571	Воронка PersonalFit, размер S (21 мм)
800.0668	Воронка PersonalFit, размер M (24 мм)
800.0711	Воронка PersonalFit, размер L (27 мм)
800.0712	Воронка PersonalFit, размер XL (30 мм)
800.0854	Воронка PersonalFit, размер XXL (36 мм)


Утилизация: в соответствии с местным законодательством.

Отметка CE в соответствии с 93/42/EEC



Упаковка содержит материалы, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами (согласно Регламенту 1935/2004).

PersonalFit™

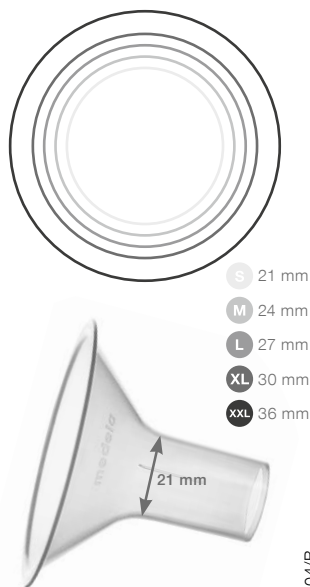

- S 21 мм
- M 24 мм
- L 27 мм
- XL 30 мм
- XXL 36 мм

© Medela AG/200.4925/2015-04/B

Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Switzerland
www.medela.com

International Sales

Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Switzerland
Phone +41 41 562 51 51
Fax +41 41 562 51 00
ism@medela.ch
www.medela.com

